

Einsendemodalitäten für zytogenetische Chromosomenuntersuchungen aus Blut

Etwa 10ml Blut in lithiumheparinisierte Röhrchen (ohne Trenngel) abnehmen.
Fetales Blut (Nabelschnurblut) sollte in der Punktionsspritze versandt werden.
Bis zur Verschickung im Kühlschrank (+4°C) aufbewahren.
Es empfiehlt sich den Stempel der Spritze mit Leukoplast zu fixieren.

Einsendemodalitäten für zytogenetische Chromosomenuntersuchungen aus Fruchtwasserzellen

Der Versand des Fruchtwassers sollte am besten in der (20ml) Punktionsspritze erfolgen.
Es empfiehlt sich den Stempel der Spritze mit Leukoplast zu fixieren.
Der Konus der Spritze sollte am besten mit einem sterilen Verschlussstopfen verschlossen werden.

Wenn eine zusätzliche FISH-Schnelltest Untersuchung gewünscht wird, ersuchen wir um Anmeldung unter Tel. 877 77 75 – 17.

Der Versand der Proben sollte auf dem schnellsten Weg erfolgen (optimalerweise nicht über ein Wochenende).